

WiFi 高清晰內視鏡掏耳棒
使用手冊



掃描二維碼下載 APP 和 說明書
P.1

一.安裝方法

1.掃描說明書首頁二維碼圖並下載，也可至 PLAY 商店(安卓手機)或 Appstore (蘋果手機)，搜索並下載手機的 **WeiView** 應用程式 App。



2.打開蓋子，耳鏡自動開啟。



3. 套上耳勺頭，確認是否套緊。裝上防護塞，可以上下移動。



4. 連接產品 WiFi：weiview-XXXX。

← 設定

Wi-Fi

Wi-Fi



weiview-tF8331

沒有安全保護的網路



5. 返回手機 APP，點擊 start 綠色圖示。

weiview



Connected



6.通過無線智慧耳鏡，可以實現觀察耳朵內部。



7.智慧兒童鎖，避免兒童誤操作。



P.6

二.注意事項

- 1.使用前，請務必裝上防塵塞，扣緊耳勺頭，以防耳朵安全。
- 2.清潔鏡頭時，請使用配備的專業酒精棉簽小心擦拭。
- 3.使用前請觀察周邊環境，請勿再有人跑動的環境下使用產品，以免撞擊。
- 4.本產品不適合 6 歲以下兒童使用。
- 5.禁止兒童單獨使用本產品，以免不慎造成傷害。
- 6.產品內建充電鋰電池，如不經常使用，允許每用充電一次。
- 7.避免產品暴露在陽光下直曬，尤其是耳勺頭，以免軟化。
- 8.使用時，產品溫度會輕微上升(最高不超過 35 攝氏度)，請放心使用。
- 9.為保證最佳使用體驗，給孩子採耳時，請讓孩子保持坐立姿勢，水平操作本產品。

三.故障分析與排除

- 1.故障：開機沒反應。
解決方法：請按照正確的開機方式多嘗試幾次。請使用配套的充電線進行充電，充電時長 1 小時。
- 2.故障：攝像頭不亮燈。
解決方法：耳鏡關機重啟。

3.故障：APP 閃退。

解決方法：卸載現有 APP，重新掃描二維碼進行安裝。

4.故障：採耳棒電源指示燈閃爍。

解決方法：電量不足，請使用配套的充電線進行充電，充電時長 1 小時。

5.故障：產品成功連接後未能正常顯示實時影像。

解決方法：將手機與耳鏡 WiFi 的連接斷開，重新啟動耳鏡，重新連接 WiFi。

6.故障：WiFi 連接不穩定，有時候幾秒鐘就斷開了。


解決方法：重啟耳鏡，重新連接 APP。

若按照以上操作仍未能解決問題，請與客服取得聯繫，我們將進一步為您提供切實可行的解決方案。



3軸定向智慧陀螺儀

機身旋轉 · 視角不轉 · 0.05測量精度 · 360°傾角識別

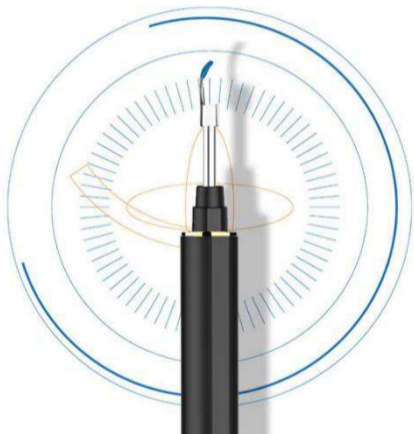

P.9

可拆卸耳扒 方便收納

掏耳棒底座同時為耳扒收納盒，方便收納



內附尖頭耳扒(大)×2、尖頭耳扒(小)×2、圓頭耳扒(大)×2、圓頭耳扒(小)×2



Type-C充電口

快速充電·方便使用

多種應用 等你來發現



檢查口腔



檢查鼻孔



鑑定郵票/字畫/鈔票等



查看電路板

磨砂親膚外殼
握感舒適·防滑耐用



四.產品規格

- 1.網路標準：IEEE 802.11b/g/n
- 2.天線：內建 IPEX 天線
- 3.工作頻率：2.4GHz
- 4.圖像傳輸速率：25FPS
- 5.圖像傳輸器：CMOS
- 6.工作環境溫度：-10~50 攝氏度
- 7.電池類型：鋰電池
- 8.電池續航時間：大約 1 小時
- 9.充電時長：1 小時
- 10.輸入電流：DC 5V 300Ma
- 11.鏡頭內徑：3.0mm
- 12.最佳焦距：1.5-2cm
- 13.像素：500 萬
- 14.重力感應器：3 軸
- 15.充電接孔：Type-C
- 16.安卓手機圖片：960*960，JPG
- 17.蘋果手機圖片：960*960，PNG
- 18.安卓手機影片：960*960，17.77FPS，3GP
- 19.蘋果手機影片：960*960，18.59FPS，MOV

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用功能和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。